


BRUKSANVISNING

1

Applicering

Trä långsamt på skyddvisiret uppifrån med visiret framåt och spännet bakåt


(om visiret levereras omonterat finns monteringsbeskrivning i förpackningen och på aquvis.se)

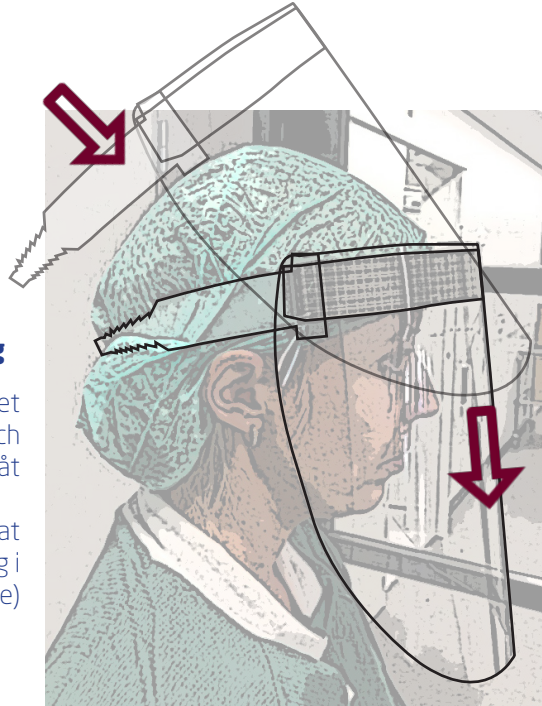

2

Anpassning/justering

Spänn fast visir genom att dra i taggade låsdelen samtidigt som ni håller emot låsdelen med spår.

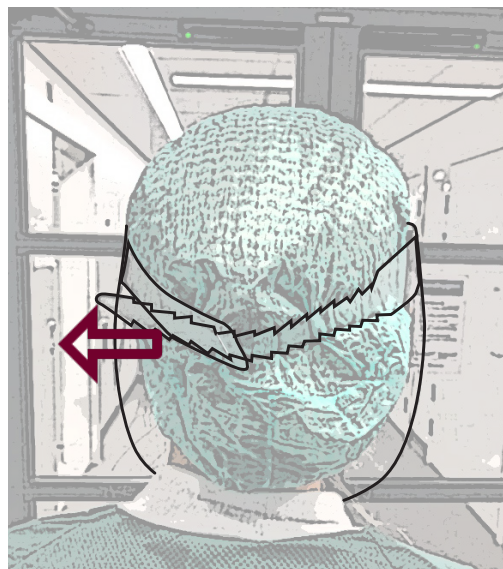

BESKRIVNING

Aquvis är avsett att skydda vårdande personal mot droppsmitta vid behandling av COVID-19 patienter.

Visiret ska skydda mot droppsmitta både från sidorna samt uppifrån samt även givetvis framifrån. Vid framtagning av visiret har detta tagits i beaktande och utformningen är gjort så att skydda väl både upp- samt framifrån såväl som från sidorna, det har även tillverkats i lätt material vilket gör att det blir bekvämt att bära även under ganska långa arbetspass.

Visiret är provat enligt MET5659 utgåva 1, optisk klass 1, användningsområde 3 (skydd mot vätska och stänk) och är avsedd för engångsbruk, dock kan man efter sprittvättning återanvända visiret. Visiret har tvättats med isopropylalkohol 20 ggr utan nämnvärd förändring i vare sig de optiska eller mekaniska egenskaperna.


Då produkten är avsedd för engångsanvändning sörjer användaren för eventuellt transportemballage om man vill använda produkten igen.

Mer information på hemsidan

Rikta kameran på din mobiltelefon mot QR-koden.



PRODUKTMÄRKNING

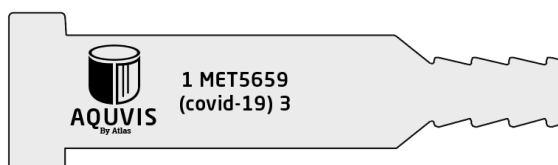

AQUVIS By Atlas = Identifiering av tillverkaren

1 = Optisk klass (1, 2 el. 3)

MET5659(covid-19) = Aktuell standard/metod

3 = Användningsområde (skydd mot vätska och stänk)

