


# Ansiktsskydd Aquvis

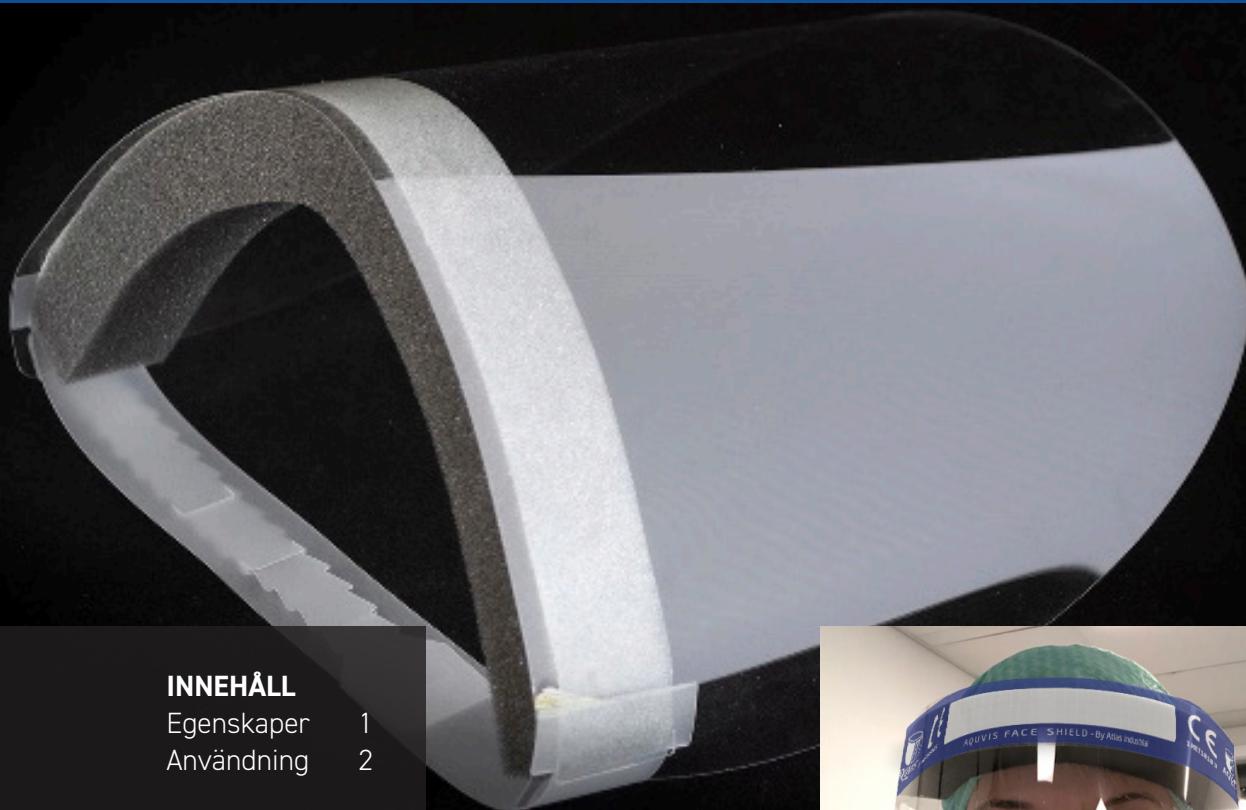

### INNEHÅLL

Egenskaper	1
Användning	2



## EGENSKAPER

Aquvis har utvecklats för att fungera som ett återanvändbart personligt skydd mot stänk- smitta inom t.ex. vård och omsorg samt annan verksamhet som kräver personnära kontak- ter. Skyddet består av en transparent visirdel med inbyggt distans (fungerar därmed även tillsammans med glasögon/skyddsglasögon och andningskydd) och ställbart huvudband.

Skyddet har utvecklats för att möta kraven EN 166:2001 – Personal eye-protection samt §7.2.4 – Protection against droplets and splashes of liquids.

Skyddet har typprovats enligt EN 166:2001 av:

**RISE Research Institutes of Sweden AB / 0402**  
**Box 857**  
**SE-501 15 Borås, Sweden**

se rapport 2P06300-01 Atlas AB Face shield AQUVIS acc. to EN166.pdf.

*EU-typcertifikat TBA*

EU-försäkran om överensstämmelse finns att tillgå på [aquvis.se](http://aquvis.se) och denna bruksanvisning är framtagen i enlighet med (EU) 2016/425 Bilaga II:1.4.



# Ansiktsskydd Aquavis

### RISKANALYS

1. Detta ansiktsskydd skyddar inte mot mekanisk påverkan.
2. Detta ansiktsskydd skyddar inte mot olika typer av strålning (till exempel sol, UV, svetsning, IR).
3. Detta ansiktsskydd ska endast användas i rumstemperatur.
4. Detta ansiktsskydd är inte brandresistent.
5. Vassa kanter kan orsaka skador på visirdel.
6. Använd inte ett skadat ansiktsskydd. Det kan försämra sikten och skyddet.
7. Ansiktsskyddet måste bytas ut om det skadats.
8. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig för återanvändning.
9. Detta ansiktsskydd skyddar inte mot frätande eller heta vätskor.

### ANVÄNDNING

#### MONTERING

Produkten levereras färdigmonterad för användning.

#### APPLICERING

Trä långsamt på skyddsvisiret uppifrån med visiret framåt och låsdelarna bakåt


#### PERSONLIG ANPASSNING/JUSTERING

Spänn fast visiret genom att dra i taggade låsdelarna samtidigt som ni håller emot låsdelarna med spår.

#### RENGÖRINGSINSTRUKTION

Visiret skall rengöras efter varje användning. Visiret rengörs manuellt med alkohol/ytsprit alternativt med en mild tvållösning med efterföljande sköljning av vatten.

För undvikande av repor på visiret skall en mjuk trasa användas.

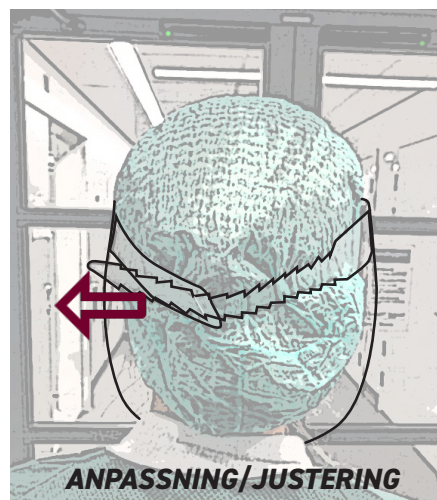

# BRUKSANVISNING

# Ansiktsskydd Aquavis

## PRODUKTMÄRKNING

AQUVIS By Atlas = Identifiering av tillverkaren

1 = Optisk klass (1, 2 el. 3)

EN 166 = Aktuell standard/metod

3 = Användningsområde (skydd mot vätska och stänk)

S = Increased robustness



## FÖRPACKNING OCH LEVERANS

Samtliga ingående delar förpackas färdigmärkta och monterade. 10, 20 eller 100 visir/förpackning.

Varje förpackning förses med "Aquavis Bruksanvisning". Varje förpackning är även märkt med CE-information samt QR-kod med länk till komplett information på [aquavis.se](http://aquavis.se).

Vi använder de för tillfället kontrakterade logistikpartners som Atlas Industrial Printing har för transporter direkt till beställare eller inköpsenheter.

## FÖRVARING

Produkten bör förvaras i rumstemperatur. Vissa materialförändringar kan uppstå vid långvarig exponering i direkt solljus

## KASSATION

### VARNING



Användaren har eget ansvar att bedöma användbarheten i produkten. För att garantera produktens funktion enligt detta dokument ska dock ett allt för repigt eller skadat visir ALLTID kasseras.

Utöver ovanstående gäller även kassation för:

Ett visir som är äldre än 10 år.

Ett visir som ej lagrats enligt förvaringsinstruktion längre tid än 1 år.

